

# Deka



Kórház | Ápolás | Otthonápolás | Támogatás



A moduláris felépítésű ágy  
minden igényhez



## Tartalom



04 Egy ágy minden feladathoz



06 Mechanikus változat



08 Elektromos változat



10 Fix magasságú változat



11 Pszichiátria osztályok számára is ideális



12 Deka Junior




14 Könnyű irányíthatóság



15 Higiénikus fekvőfelület



16 Részletek

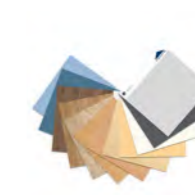

17 Beállítási lehetőségek és színek



18 Technikai adatok



19 Felszereltség és opciók



## Moduláris felépítés



## Egy ágy minden feladathoz

A Stiegemeyer Deka ágy több, mint egy egyszerű ágytípus. A Deka egy ágy **platform**, ami különböző **felszereltségű** és **méretű** ágy összeállítását teszi lehetővé. Minden intézmény a saját szakmai és gazdasági szempontjai szerint tudja összeállítani a számára leginkább megfelelő ágyat.

Minden egyes ágy változatot a jó ár-érték arány és a megszokott Stiegemeyer minőség jellemez. A Deka platform nagy teret enged az egyéni ízlésnek is, a különböző kialakítású ágyvégek és a választható színeknek köszönhetően.

Ezáltal minden egyes ágy esztétikailag és funkcionáltságában is meg tud felelni az adott osztály elvárásainak.

A Deka ágyat a letisztult formavilág jellemzi, így tisztítása és fertőtlenítése egyszerű. A mosóutca-ban is tisztítható változat segítségével a kórházak könnyebben védekezhetnek a multirezisztens kórokozókkal szemben. A Stiegemeyer hosszú ideje együttműködik a mosóutca gyártó cégekkel, mely kapcsolatból az ügyfelek is profitálnak.

### Előny az ápolóknak

- ergonomikus munkavégzés derékmagasságban
- mechanikus beállítások kíméletesen elvégezhetőek
- könnyen kezelhető 3/4-es oldalrács pár
- könnyű irányíthatóság

### Előny a technikusoknak

- masszív, karbantartás barát felépítés
- sérülés elleni védelem - könnyű irányíthatóság és fali ütköző görgők
- az ágy felületeinek a kialakítása kitűnő higiéniai tulajdonságokat biztosít

### Előny a pácienseknek

- kényelmes fekvőfelület, hátrész autoregresszióval
- könnyen kezelhető távirányító (elektromotoros változat)
- helytakarékos Junior ágyváltozat
- attraktív megjelenés

Igény szerint a Deka ágyak mechanikus és többféle elektromos változatban is lehet rendelni. A pszichiátriától kezdve az általános beteg ellátásig minden osztály kiválaszthatja a számára megfelelő változatot.

Minden Deka ágy változat könnyen irányítható, opcionálisan 5. kerék is rendelhető az ágyakhoz. Ha kevés hely áll rendelkezésre az alap 90 cm széles fekvőfelületű Deka ágy 80 cm széles fekvőfelülettel is rendelhető.

A különböző opciók és egyéb kiegészítők segítségével a Deka ágyak teljes mértékben testre szabhatóak. A következő oldalakról tájékozódhat, hogy milyen lehetőségek közül választhat.



## Mechanikus ágyváltozat - robosztus és időtálló

A villany használat többlet költséget jelenthet és az elektromos csatlakozás lehetősége sem mindig áll rendelkezésre a szükséges helyen. A mechanikus Deka ágyváltozat független az elektromos hálózattól. Az ágyat úgy lehet beállítani a páciens számára kényelmes pozícióba, hogy az ápolószemélyzet közben végig ergonomikus helyzetben tud dolgozni.

A Deka ágy magasságát 43 és 82,5 cm között lehet beállítani egy lábpedál segítségével. Az ápolószemélyzet minden helyzetben könnyen el tudja érni a lábpedált (3. kép). A beépített rásegítő megkönnyíti a lábpedál használatát. Az ágy fekvőfelülete a magasságállítás közben végig vonalban marad, így a kórterem egyéb berendezéseivel való összeütközés elkerülhető.

A Deka ágy hátrészét az ápolószemélyzet egy kar segítségével könnyen be tudja állítani (1. kép). Minden Deka ágy hátrésze autoregresszió funkcióval rendelkezik (2. kép). Az autoregresszióknak köszönhetően csökkenthetők a hátrész állítása közben a páciens bőrét erő nyíró erők.

A Deka ágy Trendelenburg és Anti-Trendelenburg pozícióba is állítható (4. kép).

A páciensek ágyból történő kiesésének megelőzésére az ágyat 3/4-es oldalráccsal lehet megrendelni. Az oldalráccsal nem rendelkező ágyakra utólag teljes hosszúságú oldalrácsokat is fel lehet szerelni.






## Az elektromotoros ágyváltozat

Az elektromos Deka ágyak magas kényelmet és biztonságot nyújtanak a kórházi mindennapokban. Az elektromos Deka ágyakat is többféle változatban lehet rendelni: csak a hátrész állítható elektromosan, a hátrész és magasság is elektromosan állítható. A három motor változatnál az ágy combrésze is elektromosan állítható.

Az ápolószemélyzet és a páciensek minden beállítást könnyen el tudnak végezni a távirányító segítségével. A Deka ágyakat két féle távirányítóval lehet rendelni, amik a funkciók letiltásának módjában térnek el egymástól. Az egyiknél az egyes funkciókat a távirányítón lehet letiltani, a másik típusú távirányító funkciót az ágy lábvégénél található nővéregységgel lehet letiltani.

A beépített lakat funkcióval rendelkező távirányítót (1. kép) az ápolószemélyzetnek elég az ágy oldalán található mágneshez (2. kép) érintenie az egyes funkciók zárolásához. A távirányítón található jelzések egyszerűek, jelentésük megértése a páciensek számára is könnyű.

A másik fajta távirányító egyes funkcióit az ágyzó pultban található nővéregység lehet letiltani (3. kép). A Trendelenburg és Anti-Trendelenburg pozíciót egy kar segítségével lehet könnyen és biztonságosan beállítani (4. kép).

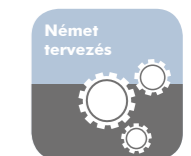



## Deka ágy magasságállítás nélkül - megbízható alapellátás

A kórházi ellátás bizonyos területein egy kórházi ágynak csak alapvető funkciókat kell biztosítania. Biztonságosnak és hosszú élettartamúnak kell lennie, miközben a tisztítása és kezelése egyszerű. Az ilyen alapellátáshoz ideális választás a mechanikus Deka ágy, magasságállítás nélkül. Az ágyváz fekvőfelületének a magassága 55 cm, ami egy jó kompromisszum az ágyból történő kiszállás és az ergonómikus munkavégzés megkönnyítéséhez.

A magasságállítás nélküli Deka ágy kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik. Az életciklusa alatt az ágy kíméli a költségvetést a robusztus és karbantartás barát felépítésével. Ezzel egyidőben a páciensek és az ápolószemélyzet is profitál az ágy könnyű tisztíthatóságával, a könnyen kezelhető oldalrácsokkal és az opcionálisan választható Anti-Trendelenburg állítási lehetőséggel.



## Ideális a pszichiátria osztályok számára

A pszichiátriai osztályokon a nyugtalan pácienseknek speciális védelemre lehet szükségük. Meg kell akadályozni, hogy az ágyban kárt tessenek, az ágy elemeivel kárt tegyenek magukban vagy az ápolószemélyzetet veszélyeztessék.

A speciálisan a pszichiátriai osztályok számára kialakított Deka ágyváz magas biztonságot kínál (1. kép). A megerősített magasságállító pedál, a hegesztett, rácsból készült fekvőfelület és bereteszelhető ágyvégek jó szemléltetik az ágy robusztus felépítését. A nagyfokú kényelmet biztosító ágy növeli az ágyban fekvő komfortérzetét.

Amennyiben a páciens lekötözése mégis elkerülhetetlen, az ágy oldalán található szerelék-tartó sín (2. kép) és a fekvőfelület hátrésze (3. kép) számos heveder rögzítési pontot kínál. További kiegészítők segítségével a Deka ágyak az osztályok egyedi igényéhez igazodva szerelhetők fel.

**Lépjön kapcsolatba velünk, ha többet szeretne tudni a Deka ágyak pszichiátria osztályokon történő alkalmazásáról.**



**Gyerekeknek  
és  
fiataloknak**

## A Deka Junior - életöröm a fiataloknak

A gyerekek és a fiatalok számára különösen fontos a biztonság érzete a kórházi tartózkodás során. A Deka Junior vidám környezetet biztosít és támogatja a gyors felépülést. A 80 x 180 cm nagyságú fekvőfelület a gyerekek és a fiatalok számára elegendő helyet biztosít, miközben az ágy szűkebb helyiségekben is jól mozgatható és pozicionálható. A magasabb páciensek számára a 20 cm-es, beépített ágyhosszbbítás nyújt megoldást (3. kép). A kórház így minden lehetőségre fel tud készülni és rugalmasan tudja alkalmazni az ágyat.

A Deka Junior ágy a felnőtt változathoz hasonlóan mechanikus és elektromotoros változatban is rendelhető.

A fiatalos és pozitív környezet megteremtése érdekében a Deka ágy élénk színű ágyvégekkel is rendelhető, mint az arany vagy a tengerkék (nagy kép).



Sok fiatal a kórházi tartózkodás alatt sem veszti el a mobilitását. Ezért a Deka Junior ágyat alapfelszereltsége nem tartalmazza az oldalrácsot, így a fiatal páciensek könnyen el tudják hagyni az ágyat (1. kép).

Amennyiben a páciens mobilitása egy műtét miatt mégis lecsökken, az opcionálisan rendelhető 3/4-es oldalrácsok védenek az ágyból történő kiesés ellen. Az ápolószemélyzet számára az oldalrácsokat használata egyszerű.

A maximális védelem érdekében az ágyhoz teljes hosszúságú oldalrács is rendelhető. Az oldalrácsot könnyen és gyorsan fel lehet szerelni az ágyra (2. kép). Ezzel a módszerrel az ágyat rövid idő alatt át lehet alakítani a következő páciens állapotának megfelelően.

A Deka Junior ágyaknál is egy kar segítségével lehet beállítani a Trendelenburg és Anti-Trendelenburg pozíciót (4. kép).



## Könnyű irányíthatóság, modern kerekek

A kórházi ágyakat sokszor gyorsan kell az épületen belül mozgatni. A könnyű irányíthatóság érdekében a Stiegelmeyer ágyak különböző típusú kerekekkel rendelhetők. A 150 mm átmérőjű duplakerék (1. kép), Integral kerék (2. kép) és ST kerék (3. kép) mindegyike nagyon jó irányíthatóságot biztosít. A 125 mm átmérőjű standard kerek (4. kép) is megfelelő futásminőséget biztosítanak.

A kerekek egyesével fékezhetőek és igény szerint az ágy központi fékrendszerrel is rendelhető. Szűk helyen történő jobb irányíthatóság érdekében az ágy 5. kerékkel is rendelhető (nagy kép).

A Deka ágyakat igény szerint alváz burkolattal is lehet rendelni, mely véd a szennyeződésekkel szemben és a tisztítása is egyszerű.



## Biztonságos és higiénikus fekvőfelület

A Deka ágy moduláris felépítése a választható fekvőfelületek számában is megmutatkozik. Különösen tartós és nagy terhelhetőségű a behegesztett rácshálós (1. kép) és a kivehető rácshálós (2. kép) fekvőfelület. A gyors és rendszeres tisztíthatóság érdekében került kifejlesztésre a higiénikus fekvőfelület (3. kép). A polipropilénből készült fekvőfelület elemek könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók, felületükön szellőzőnyílások találhatók.

Mindkét fekvőfelület típus rendelhető átröngeszhető hátrésszel (4. kép), hogy a páciensről a röntgenfelvétel az ágyban lehessen elkészíteni.

A felhasználási területtől függően a Deka ágyakat két részre osztott (5. kép) és négy részre osztott fekvőfelülettel (6. kép) is lehet rendelni.





## Részletek


A Deka ágyakhoz többféle kiegészítőt is lehet rendelni az egyedi igényeknek megfelelően. Sok kórház számít a jövőben nagyobb testmagasságú páciensekre. Az opcionálisan rendelhető, beépített ágyhosszabbítás (1. kép) 20 cm-rel növeli meg a fekvőfelület hosszúságát. Az ágy lábvégénél található ágyazó pult (2. kép) az ágyazás során nyújt nagy segítséget.

Az egész ágy fölé benyúló kapaszkodó több rögzítési pontot is kínál, a páciens helyzetének megfelelően (3. kép).

A helytakarékos kapaszkodó rudat az ágy jobb és bal oldalán is rögzíteni lehet (4. kép).

A fali ütközőgörgők (5. kép) megvédik az ágyat és az egyéb tárgyakat az ütközés okozta sérülésektől. A vízszintesen és függőlegesen is csillapító ütközőgörgő további védelmet nyújt az ágy magasságának a beállítása közben (6. kép). Az ágy sarkain található csillapító kúpok tovább csökkentik az ütközésekből származó károkat.

## Beállítási lehetőségek

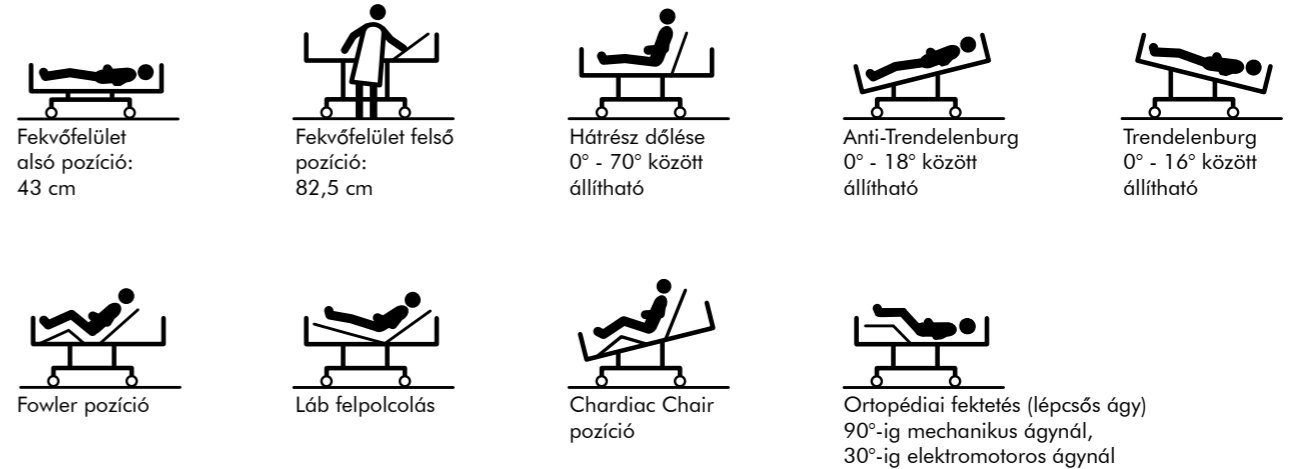

## Ágyvégek



**Valero**




**Klasszikus**



**Interkontinentális**

## Színek

Az ágyvégek színe kiválasztható egy 12 mintát tartalmazó katalógusból. Forduljon hozzánk, ha tanácsra van szüksége.

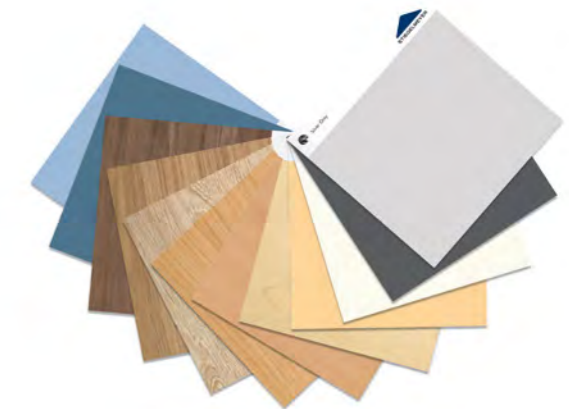

# Technikai adatok

Méreték és súly	Deka 90	Deka 80	Deka Junior
Külső méretek	102,5 x 213 cm	92,5 x 213 cm	92,5 x 193 cm
Fekvőfelület mérete	200 x 90 cm	200 x 80 cm	180 x 80 cm
Ágyhosszabbítás	20 cm	20 cm	20 cm
Fekvőfelület felosztása	80/20,5/34,5/56 cm		70/20,5/34,5/45,8 cm
Autoregresszió	8 cm		8 cm
Biztonságos terhelhetőség	225 kg		225 kg
Maximális beteg testsúly	185 - 215 kg		185 - 215 kg
Térköz az ágy alatt	15 cm		15 cm
Önsúly	130 kg		125 kg
3/4-es oldalrácscok védőmagassága	41 cm		41 cm
<b>Beállítások</b>			
Trendelenburg pozíció*	0 - 16° között		0 - 16° között
Anti-Trendelenburg pozíció*	0 - 16° között		0 - 16° között
Fekvőfelület magassága	43 - 82,5 cm között 55 cm (fix magasságú ágy esetén)		43 - 82,5 cm között 55 cm (fix magasságú ágy esetén)
Hátrész	0 - 70° között		0 - 70° között
Combrész	0 - 40° között (mechanikus ágyváltozat) 0 - 33° között (elektromotoros ágyváltozat)		0 - 40° között (mechanikus ágyváltozat) 0 - 33° között (elektromotoros ágyváltozat)

\* nem minden ágyváltozatnál elérhető

## Fekvőfelület

- Behegesztett rácshálós fekvőfelület
- Kivehető rácshálós fekvőfelület
- Rácshálós fekvőfelület, átröntgenezhető HPL hátrésszel\*
- Higiénikus fekvőfelület
- Higiénikus fekvőfelület, átröntgenezhető HPL hátrésszel\*
- 20 cm-es ágyhosszabbítás
- Alsó láb rész állítás -16°/+25° között, fogasléccel

## Tartozékok rögzítése

- Kapaszkodó és infúziós állvány két helyen rögzíthető az ágy fej- és láb végén
- Univerzális tartók az ágyvégeken
- Levehető ágyvégek, színmintából kiválasztható színekben

## Felhasznált anyagok

- Alváz és fekvőfelület: Hegesztett acél konstrukció, műanyag porfestéssel
- Ágyvégek:
  - Valero ágyvég: HPL (8 mm)
  - Klasszikus ágyvég: HPL (8 mm)
  - Interkontinentális ágyvég: műanyag
- Fekvőfelület elemek: hegesztett acél konstrukció, műanyag porfestéssel, műanyag átröntgenezhető hátrész: HPL

# Felszereltség és opciók

		Deka	Deka Junior
Fekvőfelület méretek	200 x 90 cm (matrac mérete)	●	—
	200 x 80 cm (matrac mérete)	○	—
	180 x 80 cm (matrac mérete)		●
Fekvőfelület felosztása	2-részre osztott fekvőfelület	●	●
	4-részre osztott fekvőfelület	○	○
Oldalrácscok	Oldalrácscok nélkül	●	●
	3/4-es oldalrácscok	○	○
	3/4-es oldalrácscok, beépített ütközőgörgővel	○	○
Beállítási lehetőségek	Nincs magasságállítás, manuális hátrész állítás	○	—
	Nincs magasságállítás, manuális hát-, combrész és Trendelenburg állítás	○	—
	Teljesen mechanikus	●	●
	Elektromotoros hátrész állítás, manuális hát- és combrész állítás, manuális Trendelenburg pozíció állítás	○	—
	Elektromotoros hátrész és magasság állítás, manuális combrész állítás, manuális Trendelenburg pozíció állítás	○	—
Lámpedál magasságállításához*	Elektromotoros hát-, combrész és magasság, manuális Trendelenburg állítás	○	○
	Az ágy jobb oldalán	●	●
	Az ágy mindkét oldalán	○	○
Elektromos egységek*	Távírányító (beépített zárolás funkcióval)	○	○
	Távírányító (zároló egységgel)	○	○
Ágyvégek	Akkumulátor	○	○
	Klasszikus	●	●
	Valero, lakkozott*	○	—
	Valero, krómozott*	○	—
Ágyvégek tulajdonságai	Interkontinentális*	○	—
	Klasszikus (fix oszlopok, kivehető fogantyú és ágyvég betét)	●	●
	Valero (fejvégnél levehető, lábvégen fix)	○	—
	Interkontinentális (teljesen eltávolítható)	○	—
Alapszínek	Speciálisan reteszelt ágyvégek	○	○
	Kristályfehér (hasonló, mint NCS S 0500-N)	●	●
Védelem, moshatóság	Ezüstszürke (hasonló, mint RAL 9006)	○	○
	IPX6 manuálisan mosható	●	●
Fekvőfelületek	IPX6W automata rendszerekkel mosható	○	○
	Behegesztett rácshálós fekvőfelület	●	●
	Kivehető rácshálós fekvőfelület	○	○
Fali ütközőgörgők	Higiénikus (műanyag) fekvőfelület	○	○
	Átröntgenezhető hátrész (HPL)	○	—
	4 vízszintesen csillapító görgő	●	●
Kerekek	4 univerzális görgő	○	○
	2 vízszintesen, 2 univerzálisan csillapító görgő	○	○
	Standard, külön fékezhető kerekek,	●	●
Konduktív kerék	ST kerekek	○	○
	Integral kerekek	○	○
	Dupla kerekek	○	○
Fékpédál	1 kerék	●	●
	2 kerék	○	○
	4 kerék	○	○
Irányított kerék helye	Műanyag, színes	●	●
	Fém, krómozott	○	○
	Fejvégen, jobb oldalon	●	●
	Fejvégen, bal oldalon	○	○
	Lábvégen, jobb oldalon	○	○
Egyéb kiegészítők	Lábvégen, bal oldalon	○	○
	Az ágy közepén (5. kerék)*	○	○
	Alváz burkolat *	○	○
	Ágyhosszabbítás	○	●
	Ágyazópult	○	○
5. kerék*	Külön felszerelhető, teljes hosszúságú oldalrácscok	●	●
		○	○

\*nem minden ágyváltozathoz rendelhető

● = standard ○ = rendelhető

Az Ön ágya, a mi szenvedélyünk.



**Gyártó:**

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 42, 32051 Herford,  
Németország  
Tel.: +49 (0) 52 21/185-0  
Fax: +49 (0) 52 21/185-252  
E-mail: [info@stieglmeyer.com](mailto:info@stieglmeyer.com)  
[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

**Magyarországi forgalmazó:**

Pro Klinimed XXI Kft.  
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u.  
31.  
Tel.: +36 26 390 441  
Fax: +36 26 390 476  
E-mail: [info@pro-klinimed.hu](mailto:info@pro-klinimed.hu)  
[www.pro-klinimed.hu](http://www.pro-klinimed.hu)

