

# Vida



Kórház | Ápolás | Otthonápolás | Támogatás

Letisztult forma,  
praktikus megoldások





## Megbízható és praktikus: a Vida ágy

A Vida ágy egyszerre ötvözi a modern megjelenést a megbízhatósággal és a magas funkcionalitással. A letisztult és átlátható kialakítás könnyű kezelhetőséget biztosít és ezzel egyidőben megkönnyíti az ágy előkészítését. A Vida ágy különböző változatai a legtöbb kórházi osztály elvárásainak megfelel.

A Vida ágy széles magasságállítás tartománya minden beteg számára megfelelő beülési magasságot biztosít. A legalacsonyabb pozíció biztonságot nyújt miközben segít elkerülni a kiesésből származó baleseteket.

Emellett az ápolószemélyzet az ágyat ergonomikus munkamagasságba tudja beállítani. A beépített auto-contour funkcióval a hátrész és a felső lábrész (comb) egyszerre állítható. Ez a funkció magas kényelmet biztosít a beteg számára, miközben meggátolja az ágyon való lecsúszást.

A stabil konstrukció miatt a Vida ágy biztonságos terhelhetősége 250 kg. Így a Vida ágy a nagy testsúlyú betegeknél is használható.



## Kezelőegységek

A különböző kezelőegységek segítségével a Vida ágy minden esetben könnyen és intuitív módon kezelhető. Az elvárásoknak megfelelően a betegek és az ápolószemélyzet számára készült különböző távirányítók állnak rendelkezésre.

Az ergonomikusan kialakított betegtávirányítót egy kézzel is könnyű kezelni. A betegtávirányító és zárolható változatban is elérhető, melyről a Trendelenburg (shock pozíció) funkció is elérhető vészhelyzet esetén (3. kép).


Olyan betegtávirányító is elérhető, amit a különböző, az ápolószemélyzet számára készült távirányítókkal lehet kombinálni (4. kép). A sötétben való jobb irányíthatóság érdekében a betegtávirányító rendelhető háttérvilágítással is (nincs kép).

A nővérpult segítségével az összes elektromos funkció elérhető, beleértve a CPR és Trendelenburg funkciót is (1. kép).

Emellett a betegtávirányító alapfunkciói külön-külön is letilthatóak. A zárolóegységgel az ápolószemélyzet a betegtávirányító alapfunkcióit külön-külön is zárolni tudja, valamint hozzáfér a vészhelyzetben szükséges funkciókhoz (2. kép).

A nővérpult és a zárolóegység az ágyazópultban van elhelyezve. Az ágyazópult egyszerre biztosít védelmet és könnyű elérhetőséget az ápolószemélyzet számára.

Az összes kezelőegység kombinálható a betegszatelittel. Ez a kezelőegység egy flexibilis karral van az ágy fejrésznél rögzítve. A beteg így minden helyzetben egyszerűen tudja kezelni az ágyat.

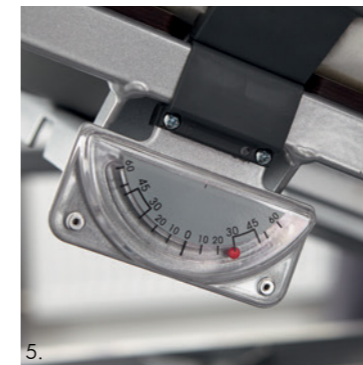

## Felszereltség

A Vida ágy különböző hasznos felszereltséggel rendelhető. Ezek a kiegészítők nagyban megkönnyítik az ápolószemélyzet mindennapos munkáját.

A kihúzható ágyazópult az ágynevelő cseréje során vagy a beteg kezelésénél nyújt segítséget (nagy kép). Továbbá itt található a zárológység és a nővérpult.

A meghosszabbítható fekvőfelület segítséget nyújt a magas betegek kényelmes és problémamentes ellátásában (1. kép).

Az ágy Integral (3. kép) vagy normál (4. kép) kerekkel is rendelhető. Mindkét változat könnyű irányíthatóságot biztosít és központi fékrendszerrel rendelkezik.

A fali ütközőgörgők teljeskörű védelmet nyújtanak és megakadályozzák az ágy és környezete károsodását (2. kép).

A dőlésszög kijelző segítségével a hátrész pontosan az orvosszakmailag megfelelő pozícióba hozható (5. kép).

A CPR karral vészhelyzet esetén a hátrész gyorsan vízszintes helyzetbe hozható (6. kép).

A Vida ágy éjszakai fényel is rendelhető. Az ágy alatti fény megkönnyíti a sötétben való tájékozódást és segítségével megelőzhetőek a kiesés okozta balesetek. Mindezt úgy, hogy az ágy alatti fény nem zavarja a szobátársakat.

A Vida ágyak az éjjeli fényel együtt fékriasztással is felszerelhetőek. A fékriasztás akkor jelez, ha az ágy a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva nincs lefékezve.




## MultiFlex oldalrácok

A MultiFlex oldalrácok teljesen lehajthatóak és pár mozdulattal felhúzhatóak és leengedhetők. Ezáltal a szűkebb helyeken is könnyen kezelhetők az oldalrácok. A MultiFlex védőrácok 41,5 cm-es védőmagasságot biztosítanak. Az oldalrácsvezető rudak az ergonómikus kialakításuknak köszönhetően kapaszkodóként is szolgálnak. A betegek így könnyebben és saját erejükből tudják elhagyni az ágyat.



## 3/4-es oldalrácok

A 3/4-es oldalrác 39 cm-es védőmagasságot biztosít. Az oldalrácok egyszerűen, függőleges irányban leengedhetők, így olyan helyeken is használhatóak, ahol kevés a hely. A oldalrác egyszerűen és gyorsan leengedhető, a beteg szükség esetén könnyen elérhető.

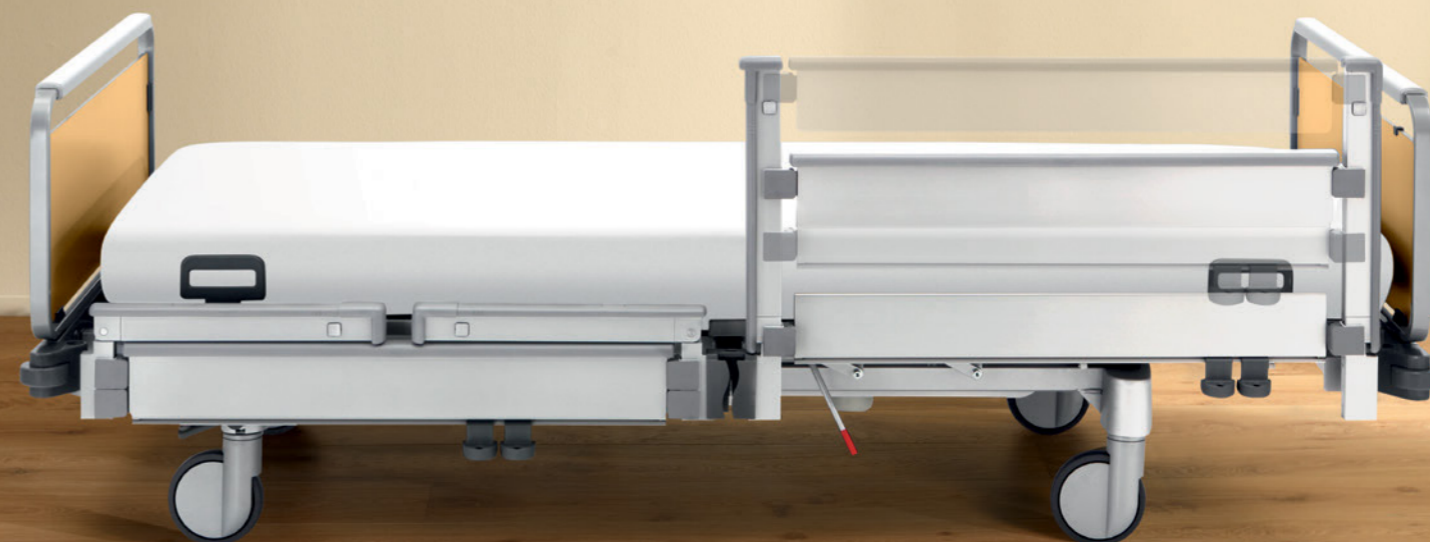






## Ágyvégek

A Vida ágyak kétféle ágyvéggel rendelhetőek. A Classic ágyvég (1. kép) 12 színben elérhető (lásd 15. oldal). Az interkontinentális ágyvég (2. kép) öt színnel rendelhető (lásd jobbra).

Az ágyvégek szükség esetén könnyen és gyorsan levehetőek. Vészhelyzet esetén gyorsan hozzá lehet férni a beteghez (lásd nagy kép, balra).

Snow White 9417-60	Azur 0744-60
Silver Grey 0160-60	Gold 0446-60
Baltic Sea D475-60	Storm 10542-60

Interkontinentális ágyvég rendelése esetén ez az hat szín választható.

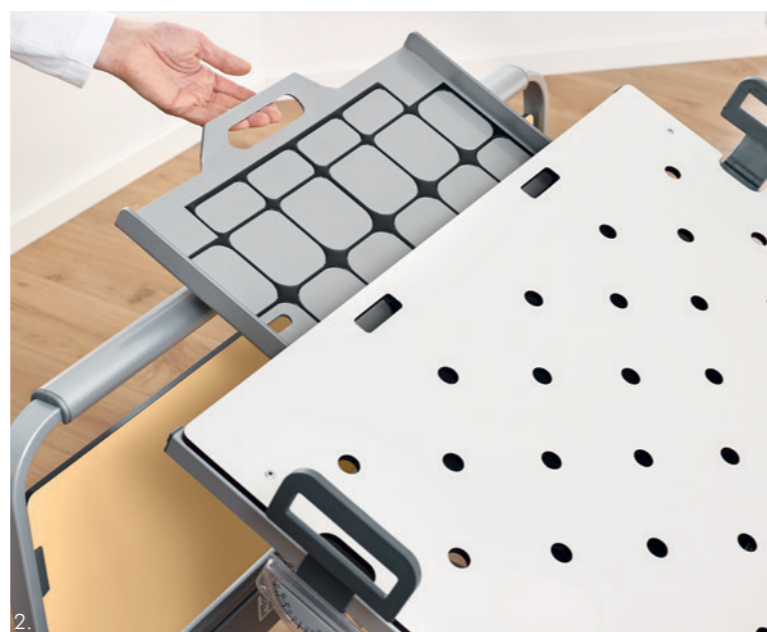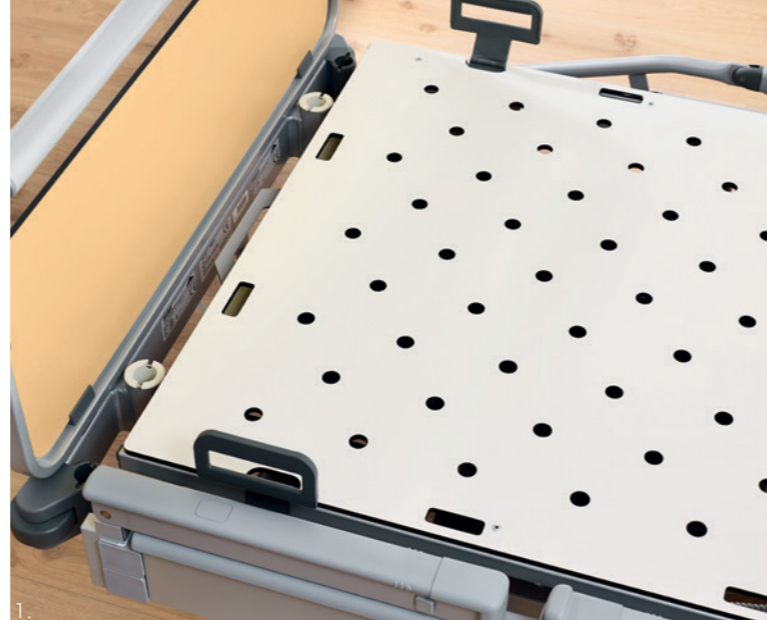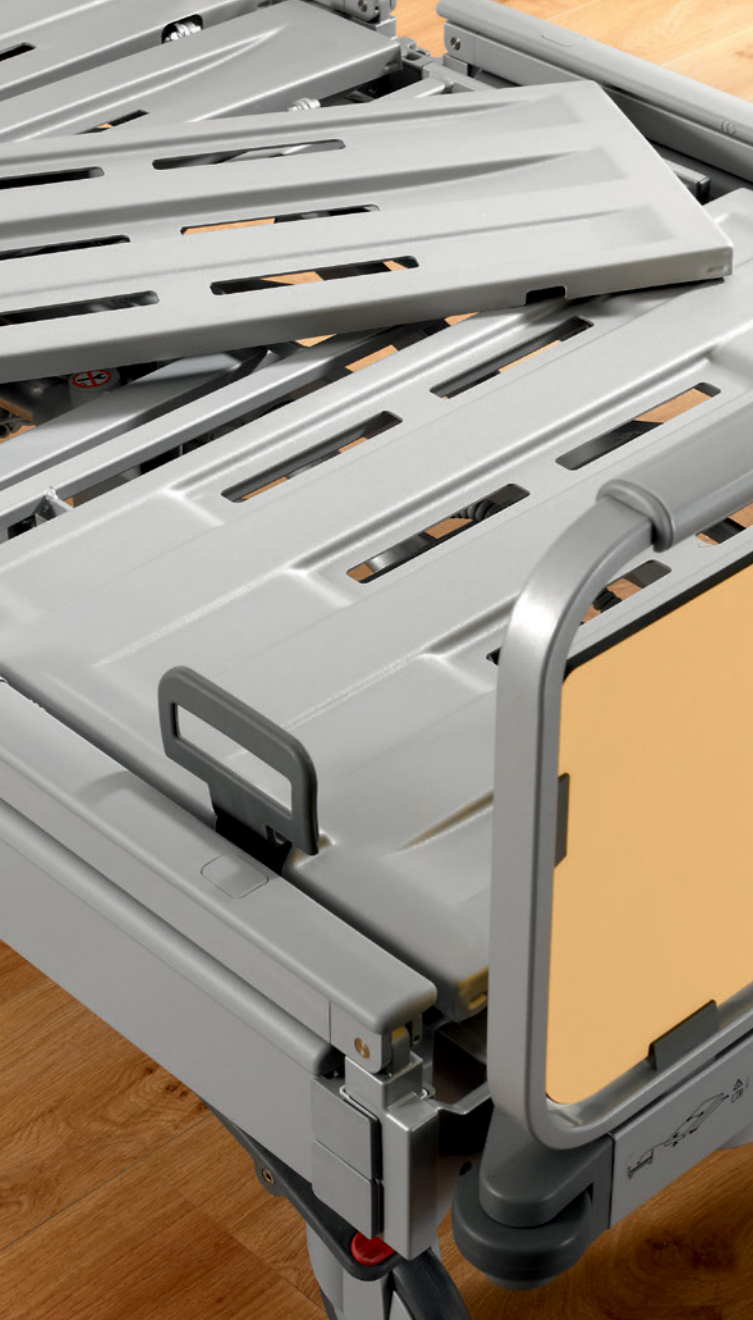

## Fekvőfelület

A Vida ágy higiénikus fekvőfelülettel rendelhető. A fekvőfelület elemek ellenálló polipropilénből készülnek. A műanyagelemek speciális formája megkönnyíti az ágy tisztítását. A fekvőfelület elemek külön-külön könnyen eltávolíthatóak, így az ágy kézi előkészítése könnyebben elvégezhető.

Igény szerint az ágy hátrészénél a fekvőfelület HPL anyagból is készülhet (1. kép).

A hátrész alatt így egy röntgenkazetta tartó is elhelyezhető (2. kép). Ezzel a kiegészítővel az ágy több kórházi osztály elvárásának is megfelel.

## Tartozékok

A tartozékok a magas minőségüknek köszönhetően a kemény kórházi hétköznapokban is jól használhatók. A tartozékok kifejesztése során a kórházi személyzet és a betegek mindennapjait tartottuk szem előtt. Minden tartozék könnyen rögzíthető és gyorsan használatra kész.

A Vida ágyhoz a tartozékok széles skálája érhető el, melyek az ágyra rögzíthetőek.

Az ágyon található különböző rögzítési pontok segítségével a beteg teljeskörűen ellátható az ágyban. A betegkapaszkodó (1. kép) és az infúziós állvány (2. kép) az ágy fej- és lábvégénél is rögzíthető. A szerléktartók mindkét oldalrácstól változat esetén a tartozékok rugalmas elhelyezését biztosítják (3. és 4. kép). A különböző tartozékok segítségével a Vida ágy a legkülönbözőbb helyzetekben jól használható.

# Technikai adatok

Méreték és súly	Vida
Külső méretek	99 x 215 cm
Fekvőfelület méretek	87 x 200 cm
Fekvőfelület elosztása	82 - 20 - 36 - 53 cm
Hátrész kompenzáció	9 cm
Biztonságos terhelhetőség	250 kg
Térköz az ágy alatt	kb. 15,5 cm
Önsúly	149 kg
<b>Beállítási lehetőségek</b>	
Trendelenburg pozíció	16°
Anti-Trendelenburg pozíció	16°
Fekvőfelület magassága	38 - 81 cm
Hátrész	0° - 70°
Felső lábrész (comb)	0° - 43°

## Fekvőfelület

- Higiénikus fekvőfelület (polipropilén)
- HPL hátrész, röntgenkazetta tartóval
- Ágyhosszabbítás 28 cm

## Tartozékok rögzítése

- Oldalrácsba integrált szereléstartó sín, állítható akasztókkal
- Fej- és lábvégnél mindkét oldalon infúziós állvány rögzíthető
- Medikai sínezés

## Fej- és lábvég

- Teljesen levehető
- Színmintából választható színekben

## Felhasznált anyagok

- Alvás és fekvőfelületkeret: Hegesztett acél konstrukció, tartós poliészter porfestéssel
- Fekvőfelület elemek:
  - Classic: 8 mm-es laminált lap betét, fém kerettel
  - Interkontinentális: PP műanyag
- Fekvőfelület elemek: PP műanyag

## Elektromos felszereltség

- Motoros magasságállítás kb. 25 másodperc
- Magas minőségű elektromos egységek:
  - alacsony áramfogyasztás
  - veszélytelen 24 V-os feszültség
  - magas teljesítmény
  - alacsony készenléti áramfogyasztás
  - alacsony elektromágneses környezetterhelés
- Ötszörös védelem a túlterhelés és a túlmelegedés ellen
- Magas minőségű földelt kábelek
- Magas minőségű távirányító kábel
- Tartós akkumulátor csomag, töltéssjelzővel
- Motoros magasság-, hátrész, felső lábrész és Trendelenburg állítás
- Alsó lábrész fogasléccelel állítható 6 fokozatban
- Motorok, zárolóegység, nívópult IP44 védelem
- Beteg távirányító, vezérlő egység IP66 védelem

## Károsodás elleni védelem

- Az ágy négy sarkán ütközőgörgők vízszintes és univerzális (opcionális) csillapítás
- Fékrasztás (opcionális): max. 5 percig tartó jelzés
- Az ágy kialakítása becsípődés elleni védelemmel bír, így megakadályozza a testrészek becsípődését (fej, kar, kéz)
- Gyors trendelenburg működtetés hálózattól függetlenül is vészhelyzet esetén
- Az ágy megfelel az EN 60601-2-52:2010 szabványnak

# Felszereltség és opciók

	Vida	
Oldalrácsok	3/4-es oldalrácsok	✘
	MultiFlex oldalrácsok	○
Fej- és lábvég kialakítása	Classic ágyvégek	✘
	Interkontinentális ágyvégek	○
Alvás színe	Kristályfehér NCS S0500 N	✘
	Ezüstsztürke RAL 9006-al egyenértékű	○
Fekvőfelület	Higiénikus, PP fekvőfelület	✘
	Higiénikus PP fekvőfelület, HPL hátrésszel	○
	Ágyhosszabbítás	✘
	Alsó lábrész hosszabbítás	○
Kerekek	ST Ø 150 mm kerekek	✘
	Integral Ø 150 mm kerekek	○
Konduktív kerekek	1 kerék	✘
	2 kerék	○
	4 kerék	○
Írányított kerék pozíciója	Fejvégen, jobb oldalon	✘
	Fejvégen, bal oldalon	○
	Lábvégen, jobb oldalon	○
	Lábvégen, bal oldalon	○
Távirányítók	Nívópult	○
	Zároló egység	○
	Beteg távirányító háttérvilágítással, nem zárolható	○
	Beteg távirányító, nem zárolható	○
	Beteg távirányító, zárolható	✘
	Beteg szatelit	○
További opciók	Ágy alatti fény	○
	Fék riasztás (ágy alatti fényvel együtt)	○
	Medikai sín	○
	További sínezés	○
	Hátrész dőlésszög kijelző	○
	Trendelenburg dőlésszög kijelző	○
	Ágyazópult	○
	Akkumulátor	○

X = Standard ○ = opcionális

# Színek

Snow White <sup>1</sup> 9417-60	Noce Lyon 4232-60	Gold <sup>1</sup> 0446-60	Eternal Cherry 4325-60
Azur <sup>1</sup> 0744-60	Silver Grey <sup>1</sup> 0160-60	Noce Praliné 4452-60	Valley Oak 4166-60
Global Beech 4306-60	Ottawa Maple 4209-60	Baltic Sea <sup>1</sup> D475-60	Storm 10542-60

<sup>1</sup> Interkontinentális ágyvégnél választható szín





A technikai változtatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!

**Gyártó:**  
Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Németország  
Tel.: +49 (0) 52 21/185-0  
Fax: +49 (0) 52 21/185-252  
E-mail: [info@stiegelmeyer.com](mailto:info@stiegelmeyer.com)  
[www.stiegelmeyer.com](http://www.stiegelmeyer.com)

**Magyarországi forgalmazó:**  
Pro Klinimed XXI Kft.  
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.  
Tel.: +36 26 390 441  
Fax: +36 26 390 476  
E-mail: [info@pro-klinimed.hu](mailto:info@pro-klinimed.hu)  
[www.pro-klinimed.hu](http://www.pro-klinimed.hu)



**STIEGELMEYER**